



www.cepalab.com.br

MIF

Conservante Parasitológico

## Instruções de Uso

### I. Finalidade

Coleta, conservação e acondicionamento de amostras de fezes para análise parasitológica. **Uso em diagnóstico *in vitro*.**

### II. Usuário pretendido

Uso pretendido para usuários leigos orientados por profissionais da área de saúde.

### III. Condições de armazenamento

Conservar à temperatura entre 15-30°C. Evitar a exposição direta à luz solar e qualquer outra fonte de calor ou ignição. Válido por 24 meses (2 anos) após a data de fabricação, se mantidas estas condições de armazenamento.

DATA DE FABRICAÇÃO / LOTE: vide embalagem

### IV. Princípio de funcionamento

É utilizado para análises parasitológicas.

### V. Tipos de amostras

Fezes.

### VI. Coleta, manuseio, preparo e preservação da amostra

O número de amostras de fezes a serem coletadas e a periodicidade depende da orientação médica.

**ATENÇÃO:** A solução conservante deve cobrir a amostra completamente, portanto, não colocar a amostra em excesso no interior do coletor.

Após o início das coletas, manter o coletor fechado e em geladeira.

### VII. Descrição do produto

- 1 espátula de plástico;
- 1 coletor de plástico com tampa sem aditivo;
- 1 embalagem flexível de plástico, contendo líquido conservante.

### VIII. Procedimento

LEIA CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO ANTES DE REALIZAR A COLETA.

1. Realizar coleta seriada da amostra conforme orientação médica.
2. Deve-se retirar apenas uma pequena porção das fezes, de forma a evitar o extravasamento e por consequência a má conservação da amostra.
3. A solução conservante deve cobrir a amostra completamente, portanto, não colocar a amostra em excesso no interior do coletor.
4. Após o início das coletas, manter o coletor fechado e em geladeira.

### IX. Advertências e precauções

1. A solução conservante contém substâncias irritantes, caso haja contato com a pele e mucosas, lavar imediatamente a área afetada com água corrente;
2. Não ingerir;
3. Em caso de ingestão acidental, procurar auxílio médico imediato, levando a embalagem do produto.

### X. Termos e condições de garantia de qualidade

A Cepalab Laboratórios Ltda obedecendo o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, para que o produto apresente o seu melhor desempenho estabelece as condições abaixo descritas:

- Não permitir que pessoas despreparadas utilizem o produto em questão;
- Não permitir o uso indevido, bem como mau uso do produto;
- Seguir detalhadamente todas as orientações de uso.

Quaisquer problemas que venham ocorrer por falha da empresa, serão resolvidos sem ônus para o cliente.

### REFERÊNCIAS

1. Lima, A. O. Métodos de laboratório aplicados à clínica, p. 5-17, 1992.
2. Cepa: dados de arquivo.

### FABRICADO POR:

KATAL BIOTECNOLOGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
CNPJ: 71.437.917/0001-04  
Rua Leiria, Nº 1160 - São Francisco - Belo Horizonte/MG - CEP: 31.255-100

**Resp. Téc.:** Raquel Miranda Gonzaga CRBio: 076936/04-D

**Reg. MS:** 10377390247

**Site:** www.katal.com.br/

### DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA:

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA  
CNPJ: 02.248.312/0001-44  
Rua Governador Valadares, 108, Chácara Reunidas São Vicente São José da Lapa - MG - CEP: 33350-000

### Atendimento ao consumidor:

**SAC:** 0800 703 1771

**E-mail:** atendimento.cliente@cepalab.com.br

**Site:** www.cepalab.com.br

**Televidas:** 0800 703 1772

(1 Edição: Rev. 06/2022)



www.cepalab.com.br

MIF

Conservante Parasitológico