
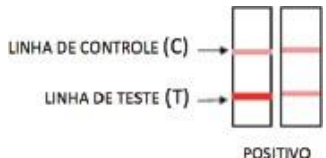


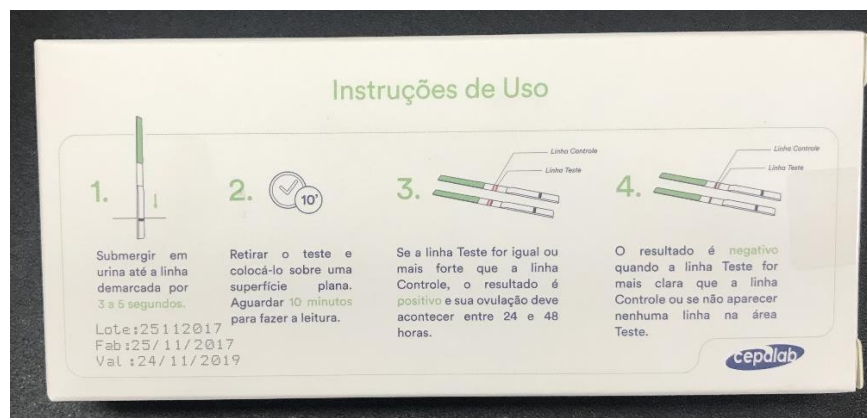


| | | | | |
|---|--|------------|--|-------------|
|  | FICHA TÉCNICA DO PRODUTO | | | |
| | FAST TEST FERTILIDADE | | | |
| | NCM | 3002.15.90 | Marca | CEPALAB |
| Validade | 2 anos | | Origem | China |
| Código do produto | 475 | | Reg. MS nº | 80258020046 |
| Código de barras | 7898960950182 | | | |
| Descrição | <p>Fast Test Fertilidade é usado para detectar o período fértil da mulher em amostras de urina humana.</p> | | | |
| | <p>Se o resultado for positivo, aparecerá uma linha vermelha na área teste com intensidade igual ou mais forte que a linha controle, a intensidade da linha teste determina o pico de LH, ou seja, quanto mais intenso a coloração maior o pico de LH e maior a probabilidade de fecundação.</p> | | <p>Se o resultado for negativo, aparecerá uma linha vermelha apenas na área controle indicando que o teste foi realizado corretamente ou aparecerá uma linha vermelha na área controle e uma linha com intensidade mais fraca na área teste.</p> | |
| |  <p style="text-align: center;">POSITIVO</p> | |  <p style="text-align: center;">NEGATIVO</p> | |
| | <p>Fast Test Fertilidade é um teste imunocromatográfico, que identifica seletivamente o LH (hormônio luteinizante) na amostra com sensibilidade de 25 mUI/mL.</p> | | | |
| Imagens do produto |  | | | |



| | | | |
|---------------------------------|---|------------------|--------------------|
| | <p>Instruções de Uso</p> | | |
| Finalidade de uso | Fast Test Fertilidade é um autoteste para orientação do período de ovulação, sem fins diagnósticos. Usado para determinação <i>in vitro</i> de LH (hormônio luteinizante) em urina humana. | | |
| Composição | 5 unidades: tiras-teste 1 unidade: manual de instrução de uso | | |
| Armazenagem e Transporte | Conservar em local seco, protegido do calor e da luz solar direta, lacrado, entre 4-30°C. Não congelar. Válido por 24 meses (2 anos) após a data de fabricação, se mantidas estas condições de armazenamento e transporte. | | |
| Embalagem | Caixa de papel cartão contendo 5 unidades de tiras-teste, embaladas unitariamente em envelope laminado. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 36/2015, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto. | | |
| Apresentação comercial | Caixa com 5 unidades de tiras-teste | Peso | 20g |
| | | Dimensões | 12,5 x 5,5 x 2,0cm |