



## FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

### SANGUE OCULTO – FOB

	<b>NCM</b>	3002.15.90	<b>Marca</b>	Cepalab
<b>Validade</b>	24 meses após a data de fabricação		<b>Origem</b>	Wondfo/China
<b>Reg. MS nº</b>	80258020128		<b>Código de barras</b>	7898960950502
<b>Código do produto</b>	641			

**Detentora do Registro:** CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

Sangue Oculto - FOB é um teste imunocromatográfico para a detecção qualitativa de hemoglobina em amostra de fezes humana. **Uso em diagnóstico *in vitro*.**

**Positivo:** duas linhas vermelhas aparecerão, uma linha na área de teste (T) e outra linha na área controle (C).




**Negativo:** somente uma linha vermelha aparecerá na área de controle (C) e nenhuma linha aparecerá na área de teste (T).




#### Descrição do produto

**Inválido:** nenhuma linha vermelha aparecerá, ou nenhuma linha aparecerá na área de controle (C). A linha na área de controle indica que o teste foi efetuado corretamente.

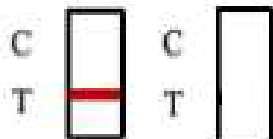

**Sensibilidade:** 100,0%  
**Especificidade:** 99,57%

**Imagens do produto**

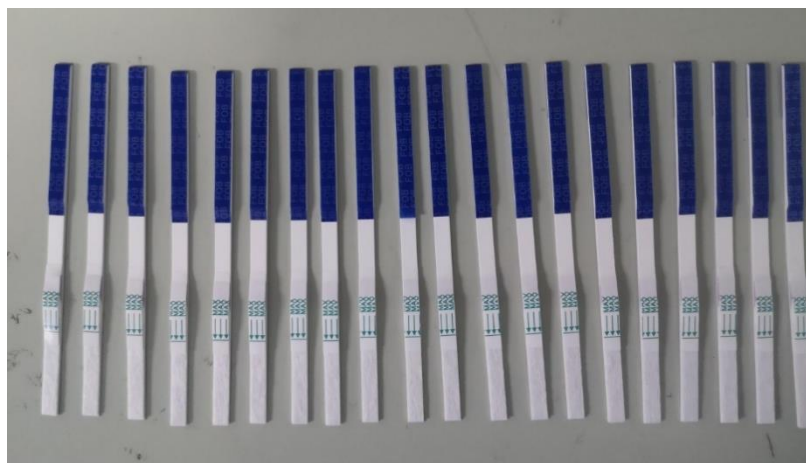

<b>Finalidade de uso</b>	Sangue Oculto - FOB é um teste imunocromatográfico para a detecção qualitativa de hemoglobina em amostra de fezes humana.
<b>Composição</b>	25 unidades de dispositivos de reação em cassete ou tira-teste; 25 coletores de amostra; 1 unidade de instrução de uso.
<b>Condições de armazenamento e Transporte</b>	Conservar na temperatura entre 4-30°C, em local seco, protegido do calor e da luz solar direta e lacrado. Não congelar. Válido por 24 meses após a data de fabricação, se mantidas estas condições de armazenamento.
<b>Embalagem</b>	Caixa de papel cartão contendo 25 unidades de cassetes embalados individualmente em envelope laminado. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº36/2015, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.
<b>Apresentação comercial</b>	R1: Caixa com 25 unidades de cassetes, 25 coletores de amostra e 1 instrução de uso.
	R2: Caixa com 25 unidades de tira-teste, 25 coletores de amostra e 1 instrução de uso.