



www.cepalab.com.br

Agulha Hipodérmica

Instruções de Uso

I. Modelos

Agulha hipodérmica 13mm x 0,30mm (30G ½)

II. Apresentação Comercial

Caixas com 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.500 ou 2.000 unidades de agulhas hipodérmicas.

III. Finalidade

A agulha hipodérmica é de uso único, esterilizada sendo utilizada na aspiração e injeção de fluidos para fins médicos.

IV. Princípio de funcionamento

Trata-se de um acessório compatível com seringas de encaixe luer slip e luer lock.

V. Modo de Uso

1. Abrir a embalagem conforme técnica asséptica.
2. Conectar adequadamente a agulha na seringa.
3. Puxar a tampa protetora para expor a agulha.
4. Utilizar conforme procedimento que será realizado.

Após o uso, descartar a agulha em coletor apropriado conforme legislação vigente, a fim de prevenir a reutilização ou contaminação.

VI. Produto Estéril

Sim.

VII. Método de esterilização

Gás óxido de etileno.

VIII. Prazo de validade

5 anos após a data de fabricação.

IX. Fabricante recomenda Uso Único

Sim.

X. Produto de Reprocessamento Proibido

Sim.

XI. Condições de Armazenamento

Manter o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

Em todas as áreas de estocagem, antes da utilização, o produto deve ser armazenado de forma a manter sua configuração e seu acabamento de superfície e não danificar a sua embalagem.

XII. Condições de Transporte

Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade. Os dispositivos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.

XIII. Condições de Manipulação

O produto deve ser manipulado por profissional legalmente habilitado e familiarizado com os procedimentos da área.

XIV. Advertências

Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo. Não permitir o uso indevido do produto. Nenhum material cirúrgico mostra ser completamente livre de reações adversas no corpo humano.

A esterilidade do produto só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade.

XV. Precauções

Não utilizar o produto se estiver com o prazo de validade expirado ou se a embalagem estiver danificada.

Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer contaminação.

O produto é estéril e de uso único.

Utilizar o produto imediatamente após a abertura da embalagem individual.

O dispositivo deve ser descartado no lixo hospitalar (conforme as normas vigentes da autoridade sanitária local).

A esterilidade do produto só é garantida se houver estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade.

XVI. Efeitos Colaterais e/ou Reações Adversas

Tomando os cuidados descritos na instrução de uso não há evidência de efeitos colaterais provocados pelo uso destes produtos.

XVII. Termos e condições de garantia de qualidade

A Cepalab Laboratórios Ltda obedecendo o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, para que o produto apresente o seu melhor desempenho estabelece as condições abaixo descritas:

- Não permitir que pessoas despreparadas utilizem o produto em questão;
- Não permitir o uso indevido, bem como mau uso do produto;
- Seguir detalhadamente todas as orientações de uso.

Quaisquer problemas que venham ocorrer por falha da empresa, serão resolvidos sem ônus para o cliente.

FABRICADO POR:

ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO. LTD
No.88 Zhenxin Road, Yangcun town, Tianchang, Anhui, China.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ: 02.248.312/0001-44
Rua Governador Valadares, 104 – Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa-MG - CEP: 33350-000
Resp. Téc. Bárbara Thamyres Barra Gonçalves - CRBM-3: 14736
Reg. ANVISA: 80258029004

Atendimento ao consumidor:

SAC: 0800 703 1771
E-mail: atendimento.cliente@cepalab.com.br
Site: www.cepalab.com.br
Televendas: 0800 703 1772

(1 Edição: Rev. 12/2021)



www.cepalab.com.br

Agulha Hipodérmica