

Instruções de Uso

I. Modelos

CEPALAB Lanceta 26G Pull Top
CEPALAB Lanceta 27G Pull Top
CEPALAB Lanceta 28G Pull Top
CEPALAB Lanceta 29G Pull Top
CEPALAB Lanceta 30G Pull Top
CEPALAB Lanceta 21G Twist
CEPALAB Lanceta 22G Twist
CEPALAB Lanceta 23G Twist
CEPALAB Lanceta 24G Twist
CEPALAB Lanceta 25G Twist
CEPALAB Lanceta 26G Twist
CEPALAB Lanceta 27G Twist
CEPALAB Lanceta 28G Twist
CEPALAB Lanceta 29G Twist
CEPALAB Lanceta 30G Twist
CEPALAB Lanceta 32G Twist
CEPALAB Lanceta 33G Twist
CEPALAB Lanceta 28G Flat
CEPALAB Lanceta 30G Flat

II. Apresentação Comercial

- 50 CEPALAB Lanceta: cartucho de papel cartão contendo 100 unidades de lancetas, esterilizadas por óxido de etileno. Uso único. Não reutilizável.
- 100 CEPALAB Lanceta: cartucho de papel cartão contendo 100 unidades de lancetas, esterilizadas por óxido de etileno. Uso único. Não reutilizável.
- 200 CEPALAB Lanceta: cartucho de papel cartão contendo 100 unidades de lancetas, esterilizadas por óxido de etileno. Uso único. Não reutilizável.

III. Finalidade

CEPALAB Lanceta é utilizada para punção no dedo ou no pé para obter amostra de sangue capilar para doseamentos laboratoriais. Essas lancetas são confeccionadas para serem utilizadas em qualquer tipo de lancetador.

IV. Princípio de funcionamento

CEPALAB Lanceta ao ser conectada ao lancetador e após este ser disparado produz um microfuro na pele do paciente, liberando uma gotícula de sangue para ser utilizada nas mais diversas formas de exames diagnósticos.

V. Modo de Uso

- Selecionar o calibre da lanceta, mais adequado para o volume de sangue desejado, idade e peso do paciente;
- Retirar a tampa do lancetador para inserir a lanceta;
- Selecionar a posição do dedo ou do pé, onde vai ser realizada a coleta de sangue, realizando a assepsia do local escolhido;
- Posicione sobre o local escolhido e aperte o botão para disparar o lancetador;
- Remover a lanceta e descartá-la em local apropriado.

VI. Produto Estéril

Sim.

VII. Método de esterilização

Gás óxido de etileno.

VIII. Prazo de validade

5 anos após a data de fabricação.

IX. Fabricante recomenda Uso Único

Sim.

X. Produto de Reprocessamento Proibido

Sim.

XI. Condições de Armazenamento

Manter o produto em ambiente limpo e seco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

Estocagem: em todas as áreas de estocagem, antes da utilização, o produto deve ser armazenado de forma a manter sua configuração e seu acabamento de superfície e não danificar a sua embalagem. Armazenar em estantes de armação metálica, vidro ou paletes de plástico, com altura mínima do piso, possibilitando assim boa frequência de limpeza e higienização; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto.

XII. Condições de Transporte

Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade. Os dispositivos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.

XIII. Condições de Manipulação

O produto deve ser manipulado por profissional legalmente habilitado, ou no caso de uso pelo paciente, este deve receber as instruções de um profissional da área de saúde.

XIV. Advertências

Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade da embalagem ou do seu conteúdo. Nenhum material cirúrgico mostra ser completamente livre de reações adversas no corpo humano. Entretanto, experiências clínicas prolongadas com os materiais que compõem a CEPALAB Lanceta mostram que o risco de reação é pequeno e as vantagens de seu emprego são mais relevantes que qualquer fator de risco. Consequentemente, a possibilidade de tais riscos deve ser considerada aceitável. Apesar de o produto passar por rigoroso controle de qualidade antes de ser liberado pelo fabricante para comercialização, uma checagem visual do estado da embalagem e da superfície do produto é aconselhável, pois este pode ter sido vítima de acidentes de transporte e/ou de manuseio incorreto que o tenham danificado ou restringido seu uso. Observe se há alterações nas características superficiais do produto ou da embalagem. Use somente dispositivos que estiverem em embalagens lacradas e que não estejam danificados, ou seja, que estiverem com o estado superficial íntegro. Descarte e não use dispositivos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se mantida o estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade.

XV. Precauções

Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer contaminação.

O produto deve ser utilizado uma só vez, não se permitindo em hipótese alguma seu reaproveitamento ou re-esterilização.

Verificar o prazo de validade e se a embalagem original se mantém intacta. Não utilizar o produto se estiver com prazo de validade vencido ou se a embalagem estiver danificada.

O produto é estéril, apirogênico e atóxico se a embalagem não for aberta ou danificada.

O produto deve ser usado de acordo com as instruções de uso.

O produto não pode ser dobrado, redobrado, angulado ou entalhado.

Utilizar sempre técnicas assépticas no manuseio.

As orientações fornecidas objetivam assegurar que os produtos permaneçam livres de contaminação ou dano antes de sua utilização. As orientações são dirigidas a todas as pessoas envolvidas no recebimento e manuseio do produto. É importante que elas estejam familiarizadas com os procedimentos recomendados, a fim de minimizar o risco e a ocorrência de danos ao produto.

XVI. Efeitos Colaterais e/ou Reações Adversas

Tomando os cuidados descritos na instrução de uso não há evidência de efeitos colaterais provocados pelo uso destes produtos.

XVII. Termos e condições de garantia de qualidade

A Cepalab Laboratórios Ltda obedecendo o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, para que o produto apresente o seu melhor desempenho estabelece as condições abaixo descritas:

- Não permitir que pessoas despreparadas utilizem o produto em questão;
- Não permitir o uso indevido, bem como mau uso do produto;
- Seguir detalhadamente todas as orientações de uso.

Quaisquer problemas que venham ocorrer por falha da empresa, serão resolvidos sem ônus para o cliente.

FABRICADO POR:

ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO. LTD
No.88 Zhenxin Road, Yangcun town, Tianchang, Anhui, China.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ: 02.248.312/0001-44
Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa-MG - CEP: 33350-000
Resp. Téc. Bárbara Thamyres Barra Gonçalves - CRBM-3: 14736
Reg. ANVISA: 80258020010

Atendimento ao consumidor:

SAC: 0800 703 1771
E-mail: atendimento.cliente@cepalab.com.br
Site: www.cepalab.com.br
Teleendas: 0800 703 1772

(1 Edição: Rev. 10/2016)



www.cepalab.com.br

CEPALAB Lanceta