

	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO		
	GLICOSIMETRO MEDISIGN		
Modelo	GH83	NCM	9027.89.99
Marca	MEDISIGN	Validade	Indeterminada
Reg. MS nº	80102512238		
Código de barras sem tiras: 7908584900149 Código de barras com tiras: 7908584900156			
Descrição	<p>A glicose na amostra de sangue reage com a glicose Desidrogenase (FAD- GDH) na tira de teste e uma corrente inofensiva é produzida. A força desta corrente muda de acordo com a quantidade de glicose na amostra sanguínea e o glicosímetro MEDISIGN GH83 automaticamente interpreta sua reação. A medição da glicose é reportada como equivalente ao plasma. Resultados que utilizam o método equivalente plasma-equivalente são aproximadamente 11% maior que aqueles obtidos com o equivalente em sangue-total nas tiras teste. Este Sistema é calibrado com amostra de sangue capilar com várias concentrações de glicose. O método referência de rastreabilidade usa materiais de referência padrão NIST (rastreabilidade).</p>		
Imagens do produto			
Finalidade	Autoteste para orientação de diabetes, sem fins diagnósticos.		
Informações	<ul style="list-style-type: none"> • Resultado preciso em 6 segundos com o uso de apenas 0.5µL amostra de sangue. • O glicosímetro calibra o código automaticamente. • Armazena até 500 testes em sua memória. • Acompanha botão ejetor de tiras. • Faixa de medição: 10-600 mg/dL (0.5 mmol/L-33.3mmol/L) • Hematócritos 10-65% • O aparelho deve ser utilizado em altitudes de até 3,500m; • Bateria: 3V bateria de lítio (CR2032) 		

Armazenagem	<ul style="list-style-type: none"> • Armazene o glicosímetro em temperatura entre 4~30°C. • Mantenha protegido da luz solar direta e em local limpo. • Não armazene em áreas de calor extremo e com umidade. • O kit contém pequenas peças, portanto mantenha fora do alcance de crianças e animais.. 		
Embalagem	Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 36/2015, com identificação de procedência, tipo, conteúdo, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
Apresentação comercial	Embalagem com 1 unidade de Glicosímetro Medisign GH83	Peso	Sem tiras: 200g
			Com tiras: 250g
		Dimensões	Sem tiras: 16x5,5x10cm
			Com tiras: 16x5,5x13,5cm