



www.cepalab.com.br

# Lancetador UniShine

## Instruções de Uso

### I. Modelos

01: Lancetador UniShine 10

### II. Apresentação Comercial

Caixas de papel cartão contendo 1 unidade de Lancetador UniShine.

### III. Finalidade

Lancetador é um dispositivo que juntamente com uma lanceta é indicado para obtenção de amostras de sangue necessárias para realização de exames ou testes que requeiram gotas de sangue.

### IV. Princípio de funcionamento

Lancetador possui um dispositivo que ao ser pressionado dispara a lanceta, que produz um microfuro na pele do paciente, liberando uma gotícula de sangue para ser utilizada nas mais diversas formas de exames diagnósticos.

### V. Modo de Uso

1. Remova a tampa do dispositivo para desconectá-la do corpo.
2. Encaixe a lanceta de acordo com a indicação e empurre para baixo até que esteja totalmente inserida, retire a tampa da lanceta e guarde-a para que após a utilização a mesma seja descartada.
3. Volte a colocar a tampa do Lancetador e certifique-se de que esteja totalmente encaixada. Ajuste para o nível adequado.
4. Segure o lancetador firme e verticalmente contra o local a ser perfurado, em seguida aperte o botão de liberação da lanceta.
5. Após a utilização, retire a tampa do dispositivo para desconectá-la do corpo, empurre o ejetor de lanceta, tampe-a e descarte-a usada em um recipiente apropriado.

### VI. Produto Estéril

Não.

### VII. Método de esterilização

Não se aplica.

### VIII. Prazo de validade

Indeterminado.

### IX. Fabricante recomenda Uso Único

Não.

### X. Produto de Reprocessamento Proibido

Não.

### XI. Condições de Armazenamento

Manter o produto em ambiente limpo e seco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

Estocagem: em todas as áreas de estocagem, antes da utilização, o produto deve ser armazenado de forma a manter sua configuração e seu acabamento de superfície e não danificar a sua embalagem. Armazenar em estantes de armação metálica, vidro ou paletes de plástico, com altura mínima do piso, possibilitando assim boa frequência de limpeza e higienização; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto.

### XII. Condições de Transporte

Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade. Os dispositivos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a

contaminação consequente disso.

### XIII. Condições de Manipulação

O produto deve ser manipulado por profissional legalmente habilitado, ou no caso de uso pelo paciente, este deve receber as instruções de um profissional da área de saúde.

### XIV. Advertências

Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade da embalagem ou do seu conteúdo. Nenhum material cirúrgico mostra ser completamente livre de reações adversas no corpo humano. Entretanto, experiências clínicas prolongadas com os materiais que compõem o lancetador mostram que o risco de reação é pequeno e as vantagens de seu emprego são mais relevantes que qualquer fator de risco. Consequentemente, a possibilidade de tais riscos deve ser considerada aceitável. Apesar de o produto passar por rigoroso controle de qualidade antes de ser liberado pelo fabricante para comercialização, uma checagem visual do estado da embalagem e da superfície do produto é aconselhável, pois este pode ter sido vítima de acidentes de transporte e/ou de manuseio incorreto que o tenham danificado ou restringido seu uso. Observe se há alterações nas características superficiais do produto ou da embalagem. Use somente dispositivos que estiverem em embalagens lacradas e que não estejam danificados, ou seja, que estiverem com o estado superficial íntegro. Descarte e não use dispositivos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados.

### XV. Precauções

Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer contaminação.

Após utilizar a lanceta deve ser descartada em local apropriado. Não guarde a lancetador com a lanceta pois a mesma é de uso único. Não compartilhe lancetas utilizada com outras pessoas. Mantenha o produto fora do alcance de crianças.

O produto deve ser usado de acordo com as instruções de uso. O produto não pode ser dobrado, redobrado, angulado ou entalhado. Utilizar sempre técnicas assépticas no manuseio.

As orientações fornecidas objetivam assegurar que os produtos permaneçam livres de contaminação ou dano antes de sua utilização. As orientações são dirigidas a todas as pessoas envolvidas no recebimento e manuseio do produto. É importante que elas estejam familiarizadas com os procedimentos recomendados, a fim de minimizar o risco e a ocorrência de danos ao produto.

### XVI. Efeitos Colaterais e/ou Reações Adversas

Tomando os cuidados descritos na instrução de uso não há evidência de efeitos colaterais provocados pelo uso destes produtos.

### XVII. Termos e condições de garantia de qualidade

A Cepalab Laboratórios Ltda obedece o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, para que o produto apresente o seu melhor desempenho estabelece as condições abaixo descritas:

- Não permitir que pessoas despreparadas utilizem o produto em questão;
- Não permitir o uso indevido, bem como mau uso do produto;
- Seguir detalhadamente todas as orientações de uso.

Quaisquer problemas que venham ocorrer por falha da empresa, serão resolvidos sem ônus para o cliente.

**FABRICADO POR:**

Tianjin Huahong Technology Co., Ltd.  
A01, Plant B, No.278, Hangkong Road, Tianjin Pilot Free, Trade Zone (Air  
Port Industrial Park), 300308 Tianjin, China

**IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:**

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA  
CNPJ: 02.248.312/0001-44  
Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente  
São José da Lapa-MG - CEP: 33350-000  
Resp. Téc. Bárbara Thamyres Barra Gonçalves - CRBM-3: 14736  
Reg. ANVISA: 80258020134

**Atendimento ao consumidor:**

SAC: 0800 703 1771  
E-mail: atendimento.cliente@cepalab.com.br  
Site: www.cepalab.com.br  
Teleendas: 0800 703 1772

(1 Edição: Rev. 07/2022)



[www.cepalab.com.br](http://www.cepalab.com.br)

**Lancetador**  
**UniShine**