

	FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO		
	FAST TEST GRAVIDEZ SEMANAS DIGITAL		
NCM	3002.15.90	Código do produto	1053
Marca	CEPALAB	Fabricante	Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.
Validade	3 anos	Origem	China
Reg. MS nº	82533950032	Código de barras	7908584901337
Detentora do Registro: MR Saúde Ltda. – CNPJ: 26.386.899/0001-16			
Descrição	<p>Fast Test Gravidez Semanas Digital é um autoteste imunocromatográfico para a detecção qualitativa do hormônio gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de urina humana, para auxílio ao diagnóstico de gravidez. Uso em diagnóstico <i>in vitro</i>.</p>		
	<p>Positivo (Sim 1-2; Sim 2-3; Sim 3+): indica que a concentração de hCG presente na amostra é igual ou superior à 25mUI/mL. Nesse caso, procure seu médico.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Sim 1-2</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Sim 2-3</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Sim 3+</div> </div> <p>Negativo (Não): indica que a concentração de hCG na amostra é inferior a faixa de detecção do teste 25mUI/mL.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Não</div> </div>	<p>Inválido (?): indica que o procedimento foi realizado de forma errônea ou o dispositivo apresentou alguma falha.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">?</div> </div>	
Imagens do produto			

Finalidade de uso	Fast Test Gravidez Semanas Digital é um autoteste para orientação da gravidez. Usado para determinação in vitro de hCG (gonadotrofina coriônica humana) em urina humana.
Composição	Dispositivo de reação composto por uma base plástica onde é acondicionada a fita de tira-teste que contém o filtro de amostra (fibra de vidro), uma base conjugada (membrana de nitrocelulose), contém uma combinação de anticorpos na fase sólida em forma de sanduíche e duas áreas para detecção seletiva de hormônios gonadotrofina coriônica humana (hCG), uma base absorvente, uma bateria e uma placa de circuito (PCB). O dispositivo é embalado individualmente em um envelope laminado contendo um sachê de sílica (dessecante). Pronto para uso.
Armazenagem e Transporte	Conservar na temperatura entre 2-30°C, em local seco, protegido do calor e da luz solar direta e lacrado. Não congelar. Válido por 24 meses (2 anos) após a data de fabricação, se mantidas estas condições de armazenamento.
Embalagem	Embalagem contendo 1 unidade de dispositivo-teste embalada em envelope laminado. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 36/2015, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.
Apresentação comercial	Embalagem com 1 unidade de dispositivo-teste.